


Návod na použitie kloktacej súpravy

Pri samotnom odbere presne dodržujte uvedené inštrukcie

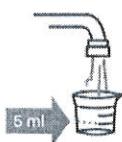


1. Napustite vodu do priloženej odmerky presne po rysku 5ml.



2. Zhlboka sa nadýchnite a zakašlite. Tým zvýšite pravdepodobnosť záchytu infekcie z dolných ciest dýchacích.



3. Obsah odmerky vlejte do úst – neprehltajte. Pokial' omylem prehltnete, postup opakujte.

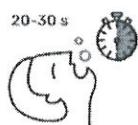

4. Kloktajte v rozmedzí 20 až 30 sekúnd. Kloktat' môžete i prerušovane, dodržte však min. celkovú doporučenú dobu kloktania.




5. Vykloktaný obsah úst vyplňuje späť do odmerky.




6. Vyklotaný obsah odmerky opatrne prelejte do priloženej skúmakvy. V skúmakve je stabilizačný prášok, ktorý nesmiate vysypať.



7. Skúmakvu dôkladne uzavrite a pretrepte. Na štítok napíšte svoje meno, rodne číslo, u cudzincov dátum narodenia.

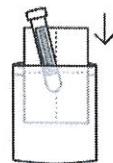


8. Uzavretú skúmakvu vložte do sáčku spoločne s absorpčnou vložkou a potom uzavrite. Celé odovzdajte na odbernom mieste, lekárovi alebo v laboratóriu.

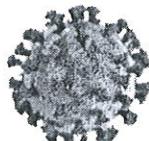

Odobratú vzorku uchovajte pri teplote 4 - 37°C.

Nevystavujte mrazu!

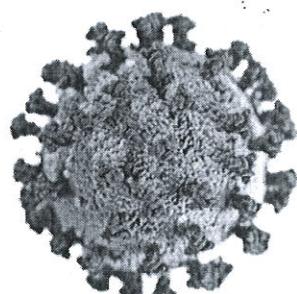

COVID LINKA 041 / 2 000 999
www.klinickabiochemia.sk